

## 非接触温度計 ボディーサーモ DT-8806H (高精度放射温度計)

販売価格 (税抜き) 20,000 円



非接触温度計 ボディーサーモ DT-8806H は、体に触れることなく額（皮膚）の温度も 0.5 秒で測定できる非接触式の赤外線温度計です。測定誤差は $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ と高精度を実現しています。

誰でも簡単に使えます。5～15 cm の距離から額の部分に赤外線センサーを向け、引き金を引くだけで瞬時に額（皮膚）の温度を表示します。ボディーサーモ DT-8806Hでは、測定した温度があらかじめ設定した温度を超過すると電子音を鳴らします。（例：38 度に設定時は 38 度以上で電子音が発生します）また、医療用体温計で体温を測定し、ボディーサーモで測定したときに温度差が大きい場合、温度を調整できる校正モード付きです。

DT-8806H は、食品や哺乳瓶、お風呂の温度も表面温度モードに切り替えて測定することができます。

ボディーサーモ DT-8806H は自働で 32 回の測定データをメモリーし、後で温度を読み出すこともできます。暗い場所での測定のためにバックライト付きです。

学校や塾、職場、アミューズメント施設、空港、病院、保健機関など、人の多く集まるところでの新型インフルエンザの感染対策(高体温者の検知)に最適です!

"本品は医療用の体温計ではありませんので、測定温度は参考値となります。正しい体温測定には医療用体温計をご使用ください"

仕様			
測定範囲	額/皮膚温度: 32.0 ~ 42.5 °C 表面温度: 0.0 ~ 60.0 °C	機能・表示	自動停止(7秒後)、電池消耗表示 指定温度アラーム、校正モード 32温度メモリー、バックライト
分解能	0.1°C	測定時間	0.5 秒
精度	±0.3 °C	使用電池	単三電池 2個
測定距離	5~15 cm	サイズ・重量	149 x 77 x 43mm 約 172 g
使用環境温度	温度:10 ~40 °C 湿度:85%RH以下(結露なきこと)	付属品	電池、日本語操作マニュアル

**MK Scientific, Inc.**

Measuring Knowledge

輸入元：  
株式会社 エムケー・サイエンティフィック

販売代理店： 日本ゲスコ株式会社  
〒305-0822 茨城県つくば市荻間 825-1  
Tel: 029(856)1388 Fax: 029(828)5578  
mail : mail@gesco.co.jp  
http://www.gesco.co.jp